

ご使用方法

1. 単三電池1個（別売）を所定の場所に入れます（図1参照）。

初めはフタが開けにくい場合がありますが、使用するうちに開けやすくなります。

2. 本製品は、**乾いた髪専用**です。コームの歯が濡れると湿気が電気回路に作用し、製品が正しく作動しませんのでご注意ください。洗髪後ではなく、洗髪前にご使用になることをお勧めします。
3. ご使用前に普段お使いのブラシで髪のもつれを梳かしておきます。
4. スイッチを押上げON（図2参照）。電動音が鳴れば、正常に作動しています。
5. 製品の表面を毛根部に対して45度の角度になるようあてます（図3参照）。

コームが耳、目、口に触れないよう注意して下さい。必ず「ROBI COMB」と書いてある面を上にして下さい。

6. 製品がシラミを除去する際には一時的に電動音が止まります。電動音が止まったまま再開しない場合は、歯の間にシラミまたはフケが挟まっている場合がありますので、付属のブラシで取り除いて下さい（図4参照）。

<取り除いてもまだ電動音が再開しない場合>

- ・ コーム部を本体から取り外し付属のブラシで汚れを取り除いて下さい。
（歯やプラスチック部に溜ったゴミや屑は特に念入りに取り除きます）
 - ・ 金属製の歯が折れたり曲がったりしていないか点検します。
 - ・ コーム部を本体に戻す前に、スイッチをONにして、コーム部が取り外された状態でも電動音が再び作動するか確認してください。電動音が再開しない場合は、電池が切れていないか、金属面にきちんと接触しているかを確認してください。確認後、製品を元の状態に戻して使用します。
 - ・ 「トラブルが起こったら」の項目も合わせてご参照ください。
7. 一回の使用時間は5分～10分が目安です。使用後はスイッチをOFFにして下さい。

8. 別のお子様のお手入れに使用する場合は、

本製品に汚れが残っていないか確認 コーム部を取り外しブラシで汚れを取り除く 消毒用アルコールに浸したブラシでコーム部（金属の歯の部分）を清掃 使用する前に歯を完全に乾燥させる（ドライヤーの熱風を当てると乾燥時間を短縮できます）

注意：その際にはドライヤーを近付け過ぎて、熱風で歯先の絶縁部を損傷しないよう注意してください。

9. 本製品は、特にシラミの成虫駆除に効果を発揮します。また、卵から孵化したばかりの幼虫駆除にも効果があります。

10. お子様が頭のかゆみを訴えたら、その都度使用されることをお勧めします。

頭にケガや傷がある場合は使用しないでください。

シラミは頭皮近くにいるため、毛先までお手入れする必要はありません。シラミの死骸は櫛目に掛からなくても、通常のブラッシングや洗髪時に取り除かれますので心配ありません。

<感染再発を予防するには>

初期の段階で成虫を駆除 毎日続けて2週間使用 前回のお手入れ後に孵化した幼虫を駆除 繁殖できる成虫になる前に幼虫を駆除

2週間続けての使用後も、週に2-3回の使用をお勧めいたします。使用を続けることによって、再繁殖を予防できます。シラミを発見した場合は、再度毎日のお手入れを行ってください。



図 1



図 2



図 3



図 4

<<裏面へ続く>>

留意点

ご使用前に、コームの歯にシラミや埃などが挟まっていないか確認してください。

消毒用アルコールで清掃した後は、使用前に製品が完全に乾いているか確認してください。

1. 敏感肌の方は電気の刺激を感じることがありますが、単三電池1つ分の電力ですので人体に危害はありません。
2. 小さなお子様が使用する場合は必ず保護者同伴のもと使用して下さい。
3. ロビコムは湿気に弱いため、濡れた髪では作動しません。また、湿度の高いお部屋での使用も避けて下さい。
4. 湿気のない場所に保管し、落としたり、ぶつけたり、引っかいたりなど、製品に損傷を与えないよう注意して下さい。
5. 使用、清掃方法は、取扱説明書に従って行って下さい。

注意点

1. 製品のご使用中にコームを挟むように持つとピリピリした電気の刺激を感じますので、ご注意下さい。
うなじや耳の近くは特に気を付けて、歯の側面が皮膚に当たらないようにご注意ください。
2. 耳、目、口に製品が触れないようにご注意ください。
3. てんかん・発作・心臓病などの疾患のある方、ペースメーカーや神経刺激装置を装着されている方は本製品を使用しないで下さい。
ロビコムに使用されているのは単三電池1個のみです。一般的な電池式製品よりも微弱な電流で作動し、政府の定める電気排出規定を満たしており、ご使用による副作用も報告されていません。特に電気の刺激に対して注意が必要な方はご注意ください。
4. ロビコムは頭髮以外には使用しないで下さい。
5. 痛みや傷がある場合は使用しないでください。

トラブルが起こったら

症状：製品のスイッチをONにしても電動音が聞こえない。

- ・金属製の歯に汚れや水分がある
- ・歯が曲がったり歯同士が触れている
- ・電池が切れかけている、等の理由が考えられます。

歯の問題かどうか判断するために、歯を取り外して本製品のスイッチを入れ、電動音が聞こえるか確認してください。その状態で電動音が聞こえたら、金属の歯をプラスチック部から取り外して下さい。ブラシを使って歯と歯の間と結合部の汚れを取り除きます。プラスチック部の内側にも汚れがないか確認して下さい。歯が曲がって歯同士が触れていないかを確認し、もし触れていればそっと離して下さい。

症状：使用時に頭皮にピリピリするような電気の刺激を感じる。

- ・使用時、製品の位置が正しく頭皮に対して角度は45度になっているか。
- ・ROBI COMBと白い字で書いてある面が上になっているか
- ・歯先の絶縁部が摩耗していないか

うなじや耳の近くを梳く場合は特に注意が必要です。コームの歯の先は1本おきに絶縁されているため、正しく使用できていれば、頭皮に電気の刺激を感じることはありません。ピリピリするような刺激や電気ショックを感じる場合は直ちに使用を中止してください。



お問い合わせはしらみつぶしねっと サポートまでご連絡ください

support@siramitsubushi.net